

사용자설명서

인슐린 주입 기록을 도움

제품 개요

SoloSmart(솔로스마트) 기기의 목적:


- SoloStar(솔로스타) 인슐린 펜으로 주입된 인슐린의 양을 기록합니다.
- 각 인슐린 주사의 날짜와 시간을 기록합니다.
- 블루투스기술을 사용하여, 기기가 연결된 앱으로 각 주사의 용량, 시간 및 날짜와 관련된 정보를 전송합니다.

SoloSmart(솔로스마트) 기기 어댑터는 호환되는 주사 펜과 동일한 사용환경에서 사용하도록 고안되었습니다. 환자의 기기 사용에 대한 알려진 금기사항은 없습니다.

박스 구성 (사진)



SOLOSMART에 대해 알아보기

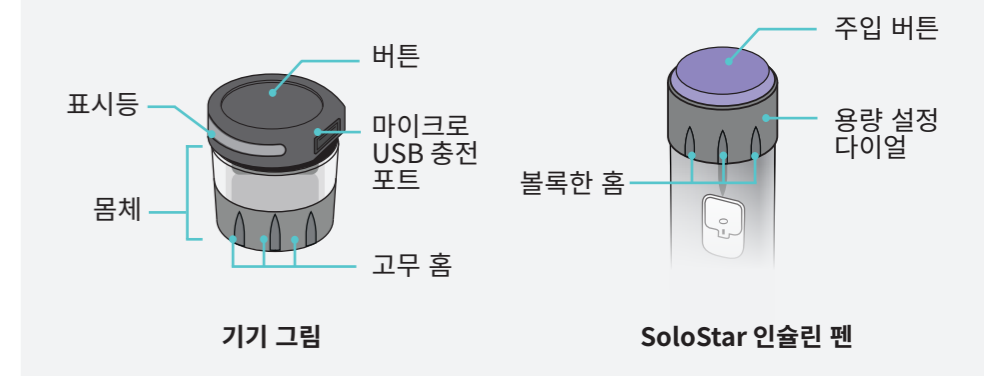


SOLOSMART 설정방법


1 기기 켜기 및 충전

기기는 배송될 당시 꺼져 있습니다. 사용 전에 기기를 켜고 충분히 충전되었는지 확인해야 합니다.

1.1 SoloSmart를 제공된 USB 케이블에 연결하고 케이블을 전원이 공급되는 USB 충전기에 연결합니다 (그림). 이렇게 하면 장치가 켜집니다.

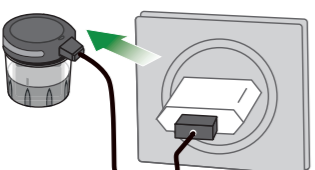

1.2 사용 전에 기기를 최소 10분 동안 충전하세요.



1.3 USB 케이블에서 SoloSmart를 뽑은 다음 충전기 플러그를 뽑습니다 (그림).




완료되면 SoloSmart 표시등이 파란색으로 바뀌면서 기기가 페어링 모드임을 나타냅니다. 하지만 아직 기기가 페어링된 것은 아닙니다.


2 호환되는 앱 다운로드 및 SOLOSMART 페어링

SoloSmart를 사용하기 전에 스마트폰의 모바일 애플리케이션에 페어링해야 합니다.

2.1 Google Play™(구글 플레이)(안드로이드 핸드폰)나 App Store®(앱스토어)(애플 핸드폰)에서 애플리케이션을 다운로드합니다.

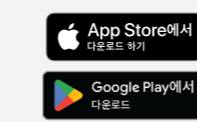


2.2 앱의 안내에 따라 SoloSmart를 페어링합니다:
• 스마트폰의 블루투스를 켜기 (아직 켜져 있지 않은 경우)
• SoloSmart 를 앱과 페어링 하기



참고: 페어링하는 동안 SoloSmart와 스마트폰 간의 거리를 10cm이내로 유지해야 합니다 (그림).

페어링 단계 마지막에 표시등이 녹색으로 변하고 꺼집니다. 일단 페어링되면 SoloSmart가 대기 모드로 들어가고 표시등이 꺼집니다.

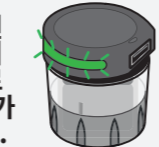


2.3 페어링 후 앱의 안내에 따라 인슐린 종류를 선택하세요.


3 SOLOSMART 를 인슐린 펜에 부착

Solosmart를 펜의 주입 버튼 위에 부착합니다. 다음 단계에 따라 주의하여 부착합니다.


3.1 SoloSmart의 투명한 부분을 잡으십시오. 기기 외부에서 그림과 같이 고무 홈(Rubber ridges)을 볼 수 있습니다.

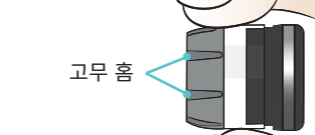

3.2 인슐린 펜의 용량 설정 다이얼이 SoloSmart의 고무 홈 사이에 오도록 SoloSmart를 펜 위에 끼워 줍니다.

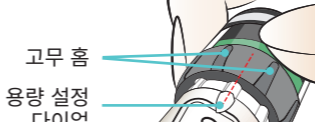


3.3 SoloSmart의 투명한 부분을 잡고 아래로 눌러서, 인슐린 펜의 주입버튼이 완전히 덮이도록 합니다 (그림).

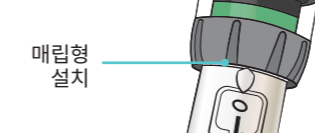


4 SOLOSMART 활성화모드로 전환

인슐린 펜에 부착된 SoloSmart 를 활성화하려면:

4.1 표시등이 보라색으로 바뀔 때까지 SoloSmart 버튼을 5초 이상 길게 누릅니다 (그림).

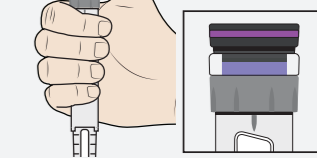

4.2 그리고 손가락을 버튼에서 땁니다. 표시등이 녹색으로 바뀌면서 장치가 현재 활성 모드임을 나타냅니다.



참고: 표시등이 보라색으로 바뀌지 않으면 SoloSmart가 완전히 아래로 눌러 있는지 확인하십시오.

이제 SoloSmart를 사용할 준비가 되었습니다.

중요: 인슐린펜 사용시, 아래의 «SoloSmart가 부착된 인슐린펜의 주사 방법» 섹션을 따르십시오.

SOLOSMART 가 부착된 인슐린펜의 주사 방법

개요


SoloSmart 부착 시에도, 인슐린펜으로 평소와 같이 주사할 수 있습니다.

안전검사(프라이밍)와 주사 지침은 인슐린펜 사용설명서를 참조하십시오.

주의: SoloSmart는 인슐린 흐름(프라이밍)을 확인하기 위한 안전검사도 자동으로 감지하고 기록합니다. 수행된 안전검사의 올바른 식별을 위해 모바일 애플리케이션을 확인합니다.

SoloSmart 주사 전


주사 전에는 항상 SoloSmart 버튼을 빠르게 눌렀다 떼어서 SoloSmart가 활성 모드인지 확인합니다 (그림).




- 표시등이 녹색으로 바뀌었다가 꺼지면 SoloSmart가 활성 모드이고 주사를 사용할 준비가 된 것입니다.
 - SoloSmart 버튼을 눌렀다가 떼 후 표시등이 켜지지 않으면 SoloSmart가 대기 모드이며 주사 전에 활성 모드로 전환해야 합니다.
- 위의 «SoloSmart 설정 방법»에 따라 장치를 활성 모드로 전환합니다. SoloSmart가 활성 모드가 되면 주사할 준비가 된 것입니다.

SoloSmart로 주사 시, 다음을 수행해야 합니다


주사하는 동안 손가락이나 손의 위치를 바꾸지 않고 한 번에 눌러서 용량을 주사하십시오 (그림).

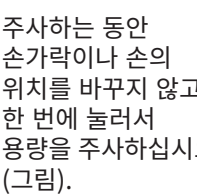


버튼의 중앙을 비스듬하지 않게, 세게 지속적으로 누릅니다 (그림).




주입하는 동안 펜을 움직이지 말고 똑바로 세웁니다 (그림).



주사 후, 빠르게 깜박이는 녹색 표시등이 꺼질 때까지 손가락이나 다른 손가락으로 주사 버튼을 계속 누르고 있습니다 (그림).

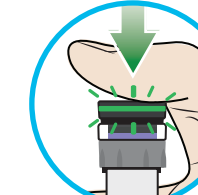

빠르게 깜박이는 녹색 표시등이 꺼질 때까지 누름

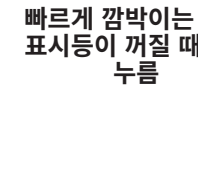


SOLOSMART 충전방법

SoloSmart의 배터리는 정상적인 조건에서 완전 충전 시 최소 1주일 동안 지속됩니다. 배터리 부족 표시등이 표시됩니다 (그림).




제공된 USB 케이블을 사용하여 SoloSmart를 전원이 공급되는 USB 충전기(제공되지 않음)에 연결하여 충전합니다 (그림).

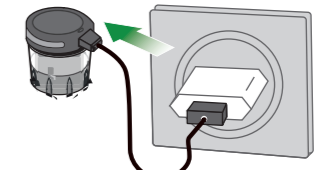

SoloSmart가 충전 중일 때 녹색 표시등이 천천히 깜박입니다.

충전 중일 때 SoloSmart로 주사하지 마십시오.

녹색 깜박임 표시등이 꺼질 때까지 장치를 충전하십시오. (완전 충전의 경우 2시간정도가 소요됩니다.) 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.




문제해결

용량이 주입되었는지 불확실한 경우

인슐린을 주사했는지 확실하지 않으면 다시 주사하지 않습니다. 의료진의 지시에 따라 치료 및 혈당을 모니터링합니다.

주황색 표시등(그림)

배터리가 부족합니다. «SoloSmart 충전» 섹션의 지침에 따라 기기를 충전합니다. 완전히 충전하려면 최소 2시간 동안 배터리를 충전하십시오. 충전 중일 때 SoloSmart로 주사하지 마십시오.



빨간색 표시등 (그림)

오류: SoloSmart가 오류 상태로, 재설정해야 하는 경우 빨간색 표시등이 켜집니다. «SoloSmart 재설정» 섹션의 지침에 따라 SoloSmart를 재설정하고 스마트폰과 다시 페어링하십시오.



문제해결

아래의 정보는 다음 장 설명을 참조해 주십시오.

- 새 펜으로 교체
- 재설정 (리셋)
- 표시등 의미
- 세척

