



IFU\_SLM\_TAI\_11\_Nov2023  
0574311-2

# SoloSmart

適用SoloStar的SoloSmart

## 使用手冊

幫助您持續追蹤胰島素的注射情形

### 用途


- SoloSmart適用於：
- 紀錄Sanofi SoloStar注射筆的注射增量(胰島素劑量)、
  - 紀錄每次胰島素注射的日期和時間、
  - 透過藍芽技術將裝置連接到智慧型手機時，將每次注射劑量、時間和日期等相關資訊，傳送到相容的行動裝置應用程式。

SoloSmart注射筆轉接頭可讓患者在相同的使用環境下作為相容的注射筆使用。目前對於這些患者使用SoloSmart，尚未出現已知的禁忌症。

### 包裝內容

- SoloSmart x1  
PN : 0273971
  - USB傳輸線 x1  
PN : 0373707
  - 使用手冊 x1
- 附註：並未包含USB充電器。使用輸出5V與至少500 mA的Class II USB壁式充電器。

### 認識SoloSmart

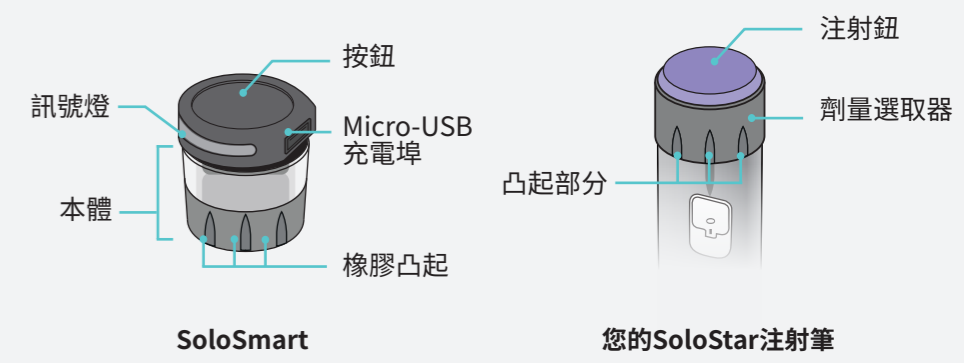

## 如何設定SoloSmart

### 1 喚醒裝置與充電

在運輸過程中必須將裝置關機。使用前請喚醒裝置並確認已經完成充電。

- 將SoloSmart連接至所提供的USB纜線，並將纜線連接至供電的USB壁式充電器。如此可喚醒裝置。
  - 使用前請將裝置充電至少10分鐘。
  - 將SoloSmart從USB纜線上取下，接著取下壁式充電器。
- 完成時，SoloSmart訊號燈會亮起藍燈，代表裝置進入配對模式但尚未完成配對。

### 2 下載相容的應用程式並與SoloSmart配對

在你能夠使用SoloSmart之前，須先和智慧型手機的行動應用程式完成配對。

- 請從Google Play™ (Android)或App Store® (Apple)下載應用程式。
- 透過App的引導，完成SoloSmart配對：
  - 打開智慧型手機的藍芽功能(若尚未開啟)。
  - 透過App將SoloSmart進行配對。

附註：在配對過程中，必須將SoloSmart持續放置於離智慧型手機10公分的距離內。
- 在配對後，依循APP的指引，選擇胰島素類型。

### 3 將SoloSmart連接至注射筆

將SoloSmart連接至注射筆的注射鈕。仔細依循以下步驟進行連接

- 握住SoloSmart的透明底座。您可在SoloSmart外側看到橡膠凸起。
- 將SoloSmart放在注射筆上，讓劑量指示器位於SoloSmart的橡膠凸起之間。
- 將SoloSmart推入透明底座，直到將注射鈕完全覆蓋。

### 4 讓SoloSmart進入啟動模式

從注射筆啟動SoloSmart：

- 用力按壓SoloSmart至少5秒，直到指示燈變為紫燈。
  - 然後將手指從按鈕上鬆開。燈號會變為綠燈，顯示裝置已進入啟動模式。
- 附註：如果燈號沒有變為紫燈，請確認已將SoloSmart往下推到底。
- 現在已可使用SoloSmart。
- 重要事項：**請依循下方「使用連接注射筆的SoloSmart進行劑量注射」的內容進行注射。

## 以連接注射筆的SoloSmart進行劑量注射

**概述**

SoloSmart可依照您的一般慣例，使用注射筆進行注射。

請參閱注射筆使用說明關於安全性測試(初注)和注射說明的內容。

**附註：**SoloSmart也會自動偵測與紀錄進行胰島素流量(初注)的安全性測試。檢查行動裝置應用程式是否正確辨識所進行的安全性測試。

### 進行SoloSmart注射前

- 進行注射前，務必快速按壓並鬆開SoloSmart按鈕，檢查SoloSmart是否處於啟動模式。
- 若燈號變為綠燈然後熄滅，表示SoloSmart已進入啟動模式並可進行注射。
- 按壓並鬆開SoloSmart 按鈕後，若訊號燈未改變，表示SoloSmart處於待機模式，必須在進行注射前進入啟動模式。
- 依循「如何設定SoloSmart」內容的步驟 4，使裝置進入啟動模式。一旦SoloSmart進入啟動模式後，即可用於進行注射。

## 故障排除

- 不確定有無遞送劑量**
- 如果你不確定是否完成胰島素注射，切勿重複注射。依您的醫護人員指示，監測您的治療藥物和血糖。
- 橘燈**
- 低電量。**依循「充電SoloSmart」內容，進行SoloSmart充電。
- 完整充電至少須對電池充電兩小時。切勿在充電期間，使用SoloSmart進行注射。
- 持續亮紅燈**
- 錯誤：**SoloSmart處於錯誤狀態且需要重設時，會持續亮紅燈。
- 依循這些說明背面的「重設SoloSmart」內容說明，重新設定SoloSmart。

## 對SoloSmart進行充電

- 充飽電的SoloSmart電池在正常情況下可持續使用至少一星期。低電量的時候，會顯示橘色燈。
- 使用所提供的USB纜線將SoloSmart連接至供電的USB壁式充電器(未提供)以進行充電。
- 在SoloSmart的充電期間，訊號燈將緩慢閃爍綠燈。
- 切勿在充電過程，使用SoloSmart進行注射。**
- 使裝置充電，直到綠色閃爍燈號熄滅。(完整充電需2小時)。完整充電後，燈號會熄滅。
- 完整充電需充電至少2小時

